



# ВИБРОСТОЛИК ПОРТАТИВНЫЙ ВБ 1.1 «АВЕРОН»



РУ №РЗН 2014/1542 от 28.03.2014

Этикетка  
АВЕ 229.000.000 ЭТ

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие Вибростолика портативного ВБ 1.1 «АВЕРОН» требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ВБ 1.1	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Вибростолика портативного ВБ 1.1 «АВЕРОН» (далее - **ВБ**), ТУ 9452-022-52331864-2013, ОКП 94 5220.

1.2 **ВБ** используется в лабораториях для удаления пузырьков воздуха из формовочной массы в процессах отливки моделей, заливки кювет и паковки литейных опок. В **ВБ** предусмотрена регулировка амплитуды колебаний.

### 1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура.....10...35 °С
- влажность при 25 °С, не более ..... 80 %

### 1.4 Основные технические характеристики

- режимы вибрации.....3000, 6000 мин<sup>-1</sup>
- размеры рабочей поверхности столика ..... 185×135 мм
- электропитание\* .....~220В 50Гц 0,5А
- габариты, не более..... 210×160×110 мм
- масса, не более .....4,8 кг

\* - вставка плавкая ВП4-3-1А-250В – 1 шт

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Вибростолик..... 1 шт

Коврик..... 1 шт

Этикетка в комплект АВЕ 229.000.000 ЭТК

- инфракрасный (ИК) датчик включения/выключения вибрации БЛИК 2.x СЕНСОР\*
- емкость (500 мл) с трубкой и мерным градуированным контейнером (50 мл), для ручного дозирования воды при заливке гипса и паковочных масс ДОЗАТОР 0.5 ПЛЮС\*
- поставка по дополнительной заявке

## 3 УСТРОЙСТВО

### 3.1 Основные элементы

1 – рабочая поверхность (резиновая накладка)

2 – опорная дуга

3 – переключатель режимов вибрации:

I – 3000 мин<sup>-1</sup>;

0 – 0;

II – 6000 мин<sup>-1</sup>

4 – ручка регулировки амплитуды колебаний



Рис.1

## 4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для повышения эффективности ручка слепочной ложки зубного ряда размещается на опорной дуге (2), которая вибрирует вместе с рабочей поверхностью (1).

Вставить вилку сетевого шнура в розетку и включить переключатель (3).

Вращение ручки (4) по часовой стрелке (к черной метке) – увеличение амплитуды, против часовой (к белой метке) – уменьшение.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

- Эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.

Для автоматического включения вибрации только на время нахождения заливаемой формы (слепочной ложки, кюветы, опоки и пр.) на рабочей поверхности **(1)**, когда руки заняты, предназначен ИК-датчик. После установки необходимо проверить и, если требуется, подстроить дальность срабатывания ИК-датчика, согласно его сопроводительной документации.

#### **ВНИМАНИЕ!**

При длительной непрерывной работе возможно отключение **ВБ** из-за срабатывания тепловой защиты.

Для возобновления работы **ВБ** необходимо выключить на 10...15 минут, переведя переключатель режимов вибрации в положение «0».

Во избежание повреждения сетевого шнура не прижимать его (и его выход из **ВБ**) вплотную к каким-либо объектам.

## **5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

**5.1** Транспортирование **ВБ** проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.

Условия транспортирования: температура от минус 50 до 50 °С, относительная влажность до 100 % при температуре 25 °С.

**5.2 ВБ** должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах в один ряд при температуре от минус 50 до 40 °С и относительной влажности до 98 % при температуре 25 °С.

Не допускается хранение **ВБ** совместно с кислотами и щелочами.

## **6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

По мере загрязнения проводить очистку наружных поверхностей **ВБ** от пыли влажной мягкой тканью, губкой.

В случае сильного загрязнения рабочей поверхности снять резиновую накладку, промыть и **после полного высыхания** надеть обратно на металлическую платформу.


#### **ВНИМАНИЕ!**


Не допускать попадания влаги на металлическую платформу и внутрь **ВБ**.

Запрещается работа без резиновой накладки.

Для уменьшения загрязнений **ВБ**, в т.ч. накладки **(1)** и переключателя **(3)**, рекомендуется защита в виде надетой сверху медицинской бахилы, с заменой ее по мере необходимости.

## 7 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Что делать
Отсутствует вибрация рабочей поверхности	Неисправный переключатель режимов вибрации	
	Сгорел плавкий предохранитель	

Примечание:  - если дефект не устранен - обратитесь к продавцу или в ближайшее представительство АВЕРОН.

## 8 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе **ВБ** не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) **ВБ** не требуется.

## 9 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности **ВБ**.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

**Адрес Изготовителя:**

**620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3**

**ООО «ВЕГА-ПРО»**

**бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20**

**тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72**

**Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23**

**бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02**

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

### ПРАЙС АВЕРОН всегда под рукой на мобильном



Приложение ПРАЙС АВЕРОН  
для Android на



<https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.averon.averonpricexml1>



Приложение ПРАЙС АВЕРОН  
для IOS (iPhone и iPad) на



<https://apps.apple.com/ru/app/прайс-аверон/id1484614177>